

Protifix®

Средства для ухода за зубными протезами



Рекомендации по применению продукции Protifix® (Протефикс)

Protifix® (Протефикс) фиксирующий крем, экстра-сильный для зубных протезов



Имеет легкий мятный аромат



Алоэ Вера обладает противовоспалительным,
ранозаживляющим и антибактериальными свойствами



Без красителей и вкусовых добавок

Способ применения:

Очистить протез и нанести тонкой прерывистой линией фиксирующий крем Protefix® (Протефикс) в углубления на зубных протезах верхней и нижней челюстей, как изображено на рисунке.

При необходимости можно нанести полоску фиксирующего крема и на заднюю часть пластины протеза верхней челюсти. Затем вставить протез и хорошо прижать его к дёснам на несколько секунд. Установленный протез фиксируется и удерживается во рту продолжительное время (не менее 12 часов). Подождать около 5 минут перед тем, как начать есть.

Расходуйте фиксирующий крем Protefix® (Протефикс) экономно, так как передозировка снижает удерживающую силу протезов.

Рекомендуется индивидуально определить оптимальную дозировку.

После использования необходимо хорошо закрыть тюбик, при этом горлышко тюбика содержать чистым и сухим.



Protefix® (Протефикс) фиксирующий порошок, экстра-сильный для зубных протезов

Способ применения:

Посыпать фиксирующий порошок Protefix® (Протефикс) тонким слоем на чистый и влажный зубной протез.

Установленный протез немедленно фиксируется на челюсти и надёжно удерживается во рту продолжительное время (не менее 12 часов). Если протез всё-таки расшатается, например, при употреблении большого количества жидкости, нужно снять протез и добавить на него немного фиксирующего порошка Protefix® (Протефикс).

Остатки порошка легко смываются с помощью зубной щётки под проточной водой.



Protifix® (Протефикс) фиксирующие прокладки для верхней челюсти

Способ применения:

При несоответствии прокладки и протезов рекомендуется подрезать прокладку, как изображено на рисунке.

Опустить прокладку на 10 секунд в тёплую воду, дать воде стечь.

Положить прокладку любой стороной на влажный протез. Оставить свободный задний край протеза шириной 2 мм, как изображено на рисунке.

Прижать прокладку к протезу большими пальцами обеих рук (начиная от центра), чтобы прокладка ровно лежала на протезе.



Protifix® (Протефикс) фиксирующие прокладки для нижней челюсти

Способ применения:

При несоответствии прокладки и протезов рекомендуется подрезать прокладку, как изображено на рисунке. Далее опустить прокладку на 10 секунд в тёплую воду, дать воде стечь, затем приложить прокладку к протезу.

Прижать прокладку указательным пальцем в углубление протеза (начиная с середины), чтобы прокладка ровно лежала на протезе.




Protefix® (Протефикс) активный очиститель зубных протезов

Способ применения:

Растворить в половине стакана слегка тёплой воды одну таблетку Protefix® (Протефикс) активного очистителя зубных протезов, как изображено на рисунке.

Предварительно очищенный при помощи зубной щётки протез опустить в стакан на 15 минут (протез должен быть полностью покрыт водой).

Перед использованием тщательно промыть водой.

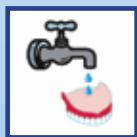

Ознакомьтесь с полным перечнем продукции **Protifix®** (Протефикс)

Protifix® (Протефикс) фиксирующий крем, экстра-сильный для зубных протезов



- Наносится на влажные зубные протезы
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов)
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении
- Препятствует проникновению пищи под протез
- Не влияет на вкус пищи и напитков
- Удобен и экономичен в употреблении
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями

Protifix® (Протефикс) Алоэ Вера фиксирующий крем, экстра-сильный для зубных протезов



Входящий в состав экстракт Алоэ Вера обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и антибактериальным свойствами, что снижает вероятность воспаления дёсен.

- Наносится на влажные зубные протезы
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов)
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении
- Препятствует проникновению пищи под протез
- Не влияет на вкус пищи и напитков
- Удобен и экономичен в употреблении

Protifix® (Протефикс) Гипоаллергенный фиксирующий крем, экстра-сильный для зубных протезов



- Без красителей и вкусовых добавок
- Наносится на влажные зубные протезы
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов)
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении
- Препятствует проникновению пищи под протез
- Не влияет на вкус пищи и напитков
- Удобен и экономичен в употреблении

Protifix® (Протефикс) фиксирующий крем с мятой, экстра-сильный для зубных протезов



- Имеет легкий мятный аромат
- Наносится на влажные зубные протезы
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении
- Препятствует проникновению пищи под протез
- Не влияет на вкус пищи и напитков
- Удобен и экономичен в употреблении

Protifix® (Протефикс) фиксирующий порошок, экстра-сильный для зубных протезов

- Наносится на влажные зубные протезы
- Сильная и надежная фиксация зубных протезов в течение дня
- Рекомендуется при нормальном и пониженном слюноотделении
- Не влияет на вкус пищи и напитков
- Прост и экономичен в использовании
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями



Protifix® (Протефикс) активный очиститель для зубных протезов

- Быстро и эффективно очищает зубной протез с помощью активного кислорода
- Устраняет бактериальный налёт
- Не разрушает материал зубного протеза
- Удаляет неприятные запахи
- Время воздействия — 15 минут
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями



Protifix® (Протефикс) фиксирующие прокладки для верхней и нижней челюстей

- Обеспечивают надёжную фиксацию зубного протеза в течение дня
- Защищают от натёртостей и воспалений
- Рекомендуются на этапе привыкания и при использовании временных зубных протезов
- Эффективны при возрастной деформации дёсен
- Просты в использовании
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями



10 рекомендаций ухода за зубными протезами

1. Наберитесь немножко терпения в первые дни. Зубные протезы требуют привыкания.
2. Ешьте в первые дни только мягкую пищу и постепенно переходите к более жесткой.
3. Не кусайте в первое время передними зубами.
4. Начальные трудности с выговариванием слов преодолеваются речевыми упражнениями, чтением вслух.
5. Не снимайте зубные протезы первые 2-3 ночи. Не делайте поправок без врача.
6. При появлении болевых ощущений или натертостей немедленно обращайтесь к врачу.
7. Каждые полгода ходите на профилактические осмотры к врачу для проверки правильности посадки зубных протезов.
8. Регулярно 2 раза в день – утром и вечером – чистите свои зубные протезы.
9. В целях гигиены, мыть зубные протезы и полоскать рот нужно после каждого приёма пищи, на всякий случай мойте свои зубные протезы над раковиной, заполненной водой, или над мягким полотенцем.
10. Следите за прочностью крепления своих зубных протезов – ее Вам обеспечат фиксирующие средства для зубных протезов Protifix®

Производитель: Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Шлезвигер Штрассе 74
24941 Фленсбург, Германия
Дистрибьютор в России: ООО «Квайссер Фарма» 115054,
г. Москва, ул. Дубининская, д. 69, корп. 74
Тел. (495) 660-97-60, www.queisser.ru

Август 2013 г.